


## Die IDAL® App – unterstützt Sie bei der Verwendung Ihres IDAL® Gerätes!



# „Konto und Einstellungen“

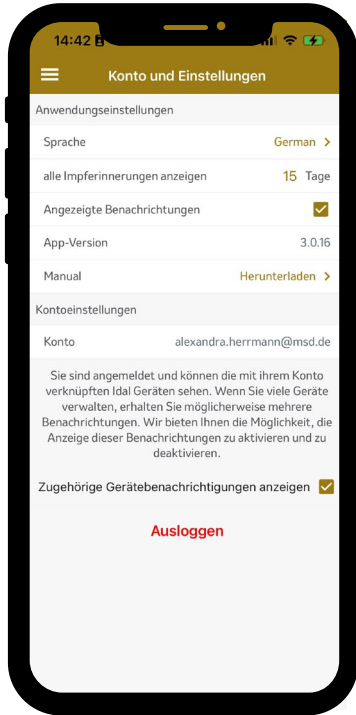

## SPRACHE

Wählen Sie die richtige Sprache. Die App wird standardmäßig auf die Sprache Ihres Telefons eingestellt, falls verfügbar.

## KONTO

Zur Bedienung der App ist die Einrichtung eines Kontos **nicht zwingend**. Sprechen Sie mit Ihrem MSD-Ansprechpartner, ob ein Konto für Ihre Nutzung Sinn macht. Wenn Sie eines haben, verbinden Sie hier Ihr Track & Trace-Konto, um auf Ihre Geräte zuzugreifen.

## BENACHRICHTIGUNGEN

Legen Sie Impferinnerungen fest oder entfernen Sie Benachrichtigungen aus der App.

## VERSION


Überprüfen Sie, welche Version der App Sie verwenden.

# Gerät(e) verbinden


Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen". Sobald Sie es gefunden haben, klicken Sie auf "Gerät koppeln".



Klicken Sie auf "Gerät koppeln". Die APP verbindet sich mit dem IDAL® und synchronisiert sich dann mit der Cloud.

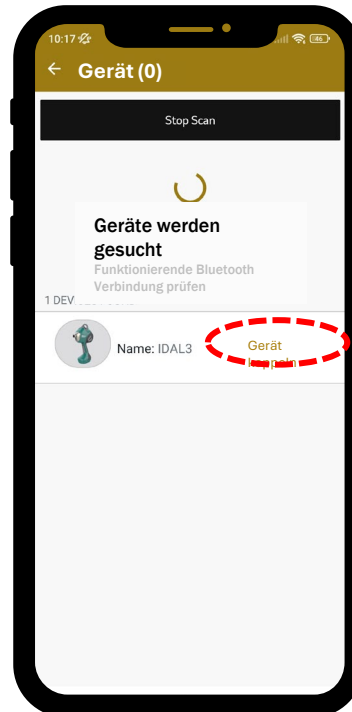

IDAL einschalten. Die App verbindet sich mit dem IDAL® und synchronisiert sich dann mit der Cloud.

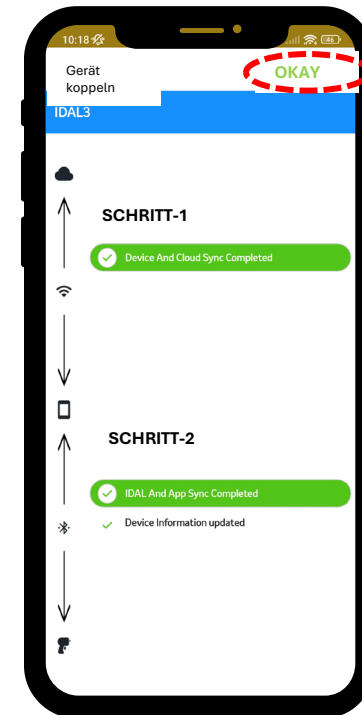




Hinweis: Für die Kopplung mit Geräten ist sowohl beim IDAL® als auch beim Mobiltelefon eine Bluetooth-Verbindung erforderlich. Das IDAL® muss eingeschaltet sein, um sich mit der App zu verbinden.

# Impfsessions abrufen

Um Ihre Impfsessions vom IDAL® abzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche "SYNCHRONISATION".

Auf diesem Bildschirm werden abgerufene Sessions und Geräteinformationen angezeigt.

Wählen Sie den Session-Bildschirm aus und füllen Sie die einzelnen Impfsessions mit Impfstoffinformationen aus. Erneut synchronisieren.

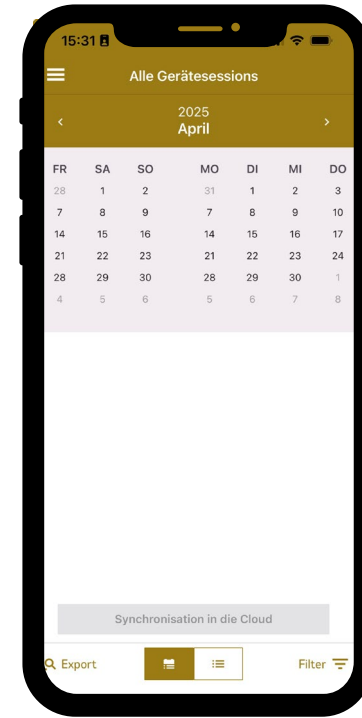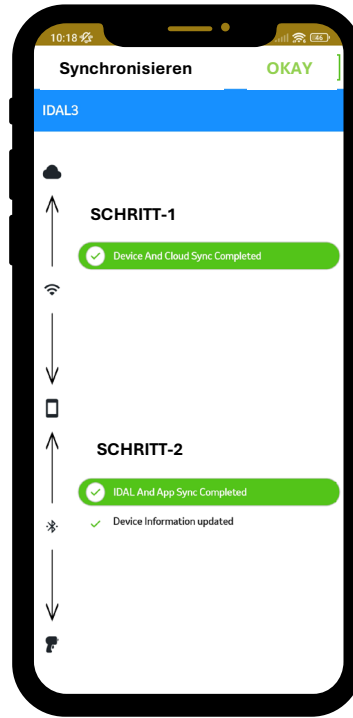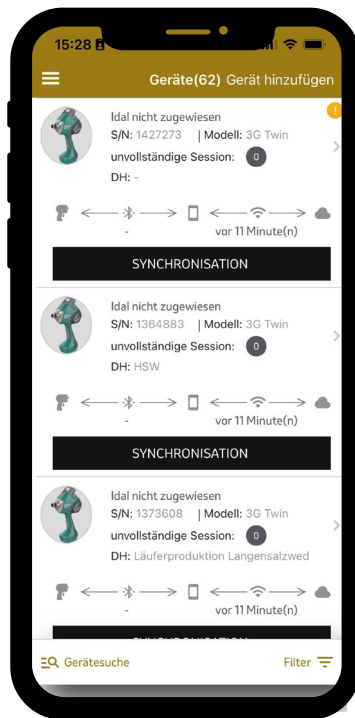


# Filtern, Suchen und Synchronisieren

## SUCHE UND FILTER


Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf "Suchen" und suchen Sie nach Seriennummer und Gerätetypen.

Klicken Sie auf "Filter", um die Filter für IDAL® -Modell und Sichtbarkeitsstatus auszuwählen. Sie können ein Gerät auch aus der Liste ausblenden, indem Sie mit dem Finger von der linken Seite des Geräts wischen.

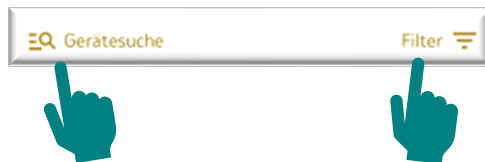

## SYNCHRONISATION

Sie können Ihre letzte Synchronisierung mit dem IDAL® und der Cloud sehen. Klicken Sie auf "SYNCHRONISATION", um den Vorgang aus der Liste zu starten.


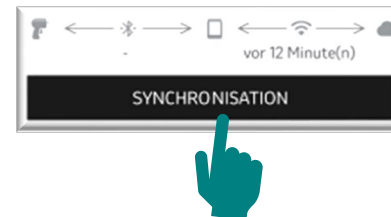


# Überprüfen von Sessions unter Rubrik „Sessions“

## KALENDERANSICHT

In der Kalenderansicht werden die Sessions nach Kalendertagen angezeigt. Wenn Sie auf jeden Tag klicken, können Sie die Sessions dieses Tages anzeigen. Wenn Sie auf die Session klicken, können Sie Details wie den verwendeten Impfstoff und die Anzahl der Dosen anzeigen.

Verwenden Sie die Schaltflächen am unteren Rand der Kalenderansicht, um zur Listenansicht zu wechseln. In der Listenansicht können Sessions nach Datumsbereichen gefiltert werden.

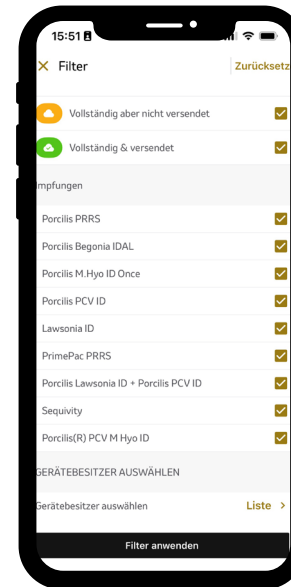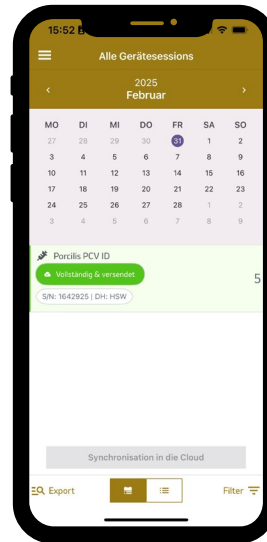


## EXPORT UND FILTER

Sie können Daten der Sessions in eine CSV-Datei exportieren und auch nach Status, Impfstoff und Gerät filtern.




# Fehlerbehebungen

*Keine Bluetoothverbindung erkannt*

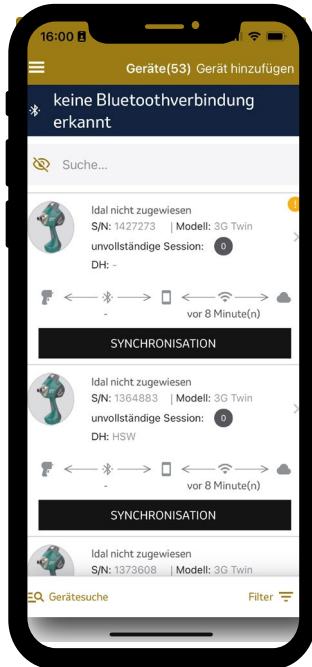


Für die Kopplung mit Geräten ist sowohl beim IDAL® als auch beim Mobiltelefon eine Bluetooth-Verbindung erforderlich.

*Keine Bluetoothverbindung und keine Internetverbindung erkannt*

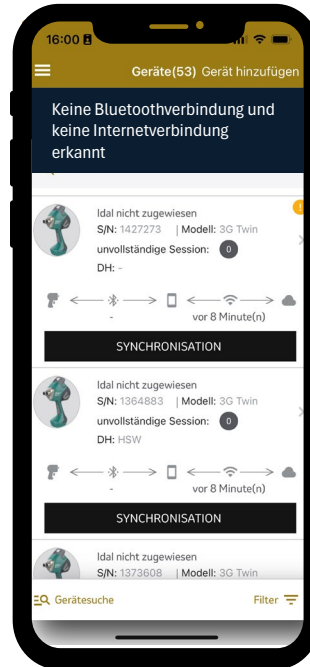

Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die Cloud synchronisieren zu können.

*Dieses IDAL-Gerät ist nicht bei einem Besitzer registriert*

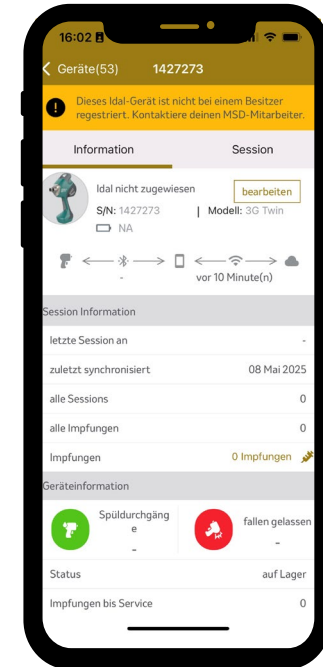

Wenn der Fehler "IDAL nicht registriert" angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren MSD-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten.

# Fragen?

Kontaktieren Sie unsere Farm Device Sales Manager



B. Sc.agr. Sebastian Kleiner  
Region Nordwest  
+49 (160) 8968810  
sebastian.kleiner@msd.de



Sascha Hübener  
Region Süd und Österreich  
+49 (173) 6473383  
sascha.huebener@msd.de

Folgen Sie uns auf **Instagram** und **facebook**!

