



Pflege & Wartung

wöchentlich:

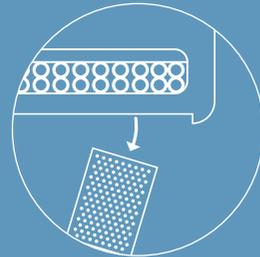

Staubfilter reinigen
Filter aus der Abdeckung nehmen und unter fließendem Wasser spülen


Kondenswasser entfernen
Tropfblech entnehmen und entleeren

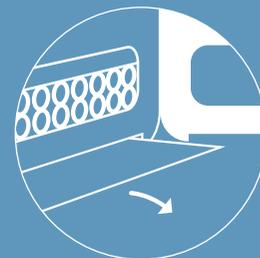

monatlich:

Ventilatoren reinigen

Chiller von der Wand nehmen. Bei **beiden** rückseitigen Ventilatoren mit Pinsel oder Wattestäbchen Schmutz entfernen bzw. lösen und mit Staubsauger absaugen.

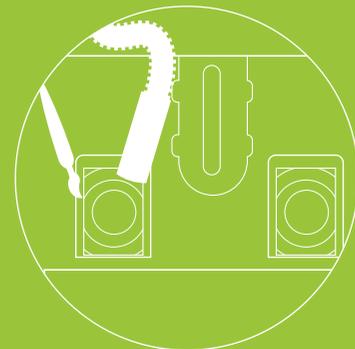

Demo-Video

zur Funktion • Pflege • Wartung

www.msd-tiergesundheits.de/nobivac-clever-cooler-chiller

Ausstattung und Zubehör




x20

Schienen für Impfstofffläschchen




Technische Daten

Maße: 46 x 17 x 30 cm; Gewicht: 10 kg; Platz für 15 Schienen à 13 Impfstofffläschchen; Stromverbrauch max. 85 Watt

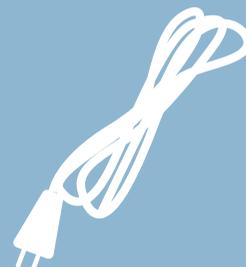


Netzkabel (2 m)

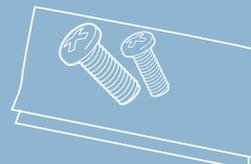

Montagematerial und -anleitung zur Befestigung an der Wand



Greifklammer zur Entnahme der Fläschchen aus der Packung und zur Einführung in die Schiene

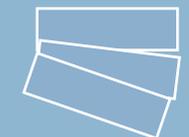

Magnetische Impfstofftäfelchen



Gebrauchsanleitung

Bezugsquelle: **Exklusiv von MSD Tiergesundheit, sprechen Sie mit dem/der zuständigen Außendienstmitarbeiter/in**

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheits.de
Intervet GmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheits.at

MSD
Tiergesundheit

Clever Cooler Chiller

Chiller

Impfstofflagerung intelligent gedacht



MSD
Tiergesundheit


150930-D_A_Jun2020(1000)123_DE-NOV-200500005



Griffbereit auf Augenhöhe

Die Aufbewahrung und Vorratshaltung von Impfstoffen geschieht jetzt auf höherem Niveau:

In einem kompakten Kühlaggregat an der Wand, kaum größer als ein Aktenkoffer auf Augenhöhe und dort wo man die Impfstoffe braucht – im Behandlungsraum.

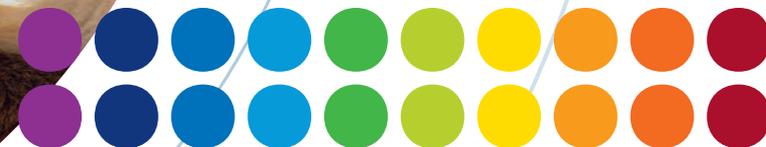

Das ganze Impfrepertoire im Blick

Der Chiller enthält **15 Schachtschienen** und bietet gekühlten Raum für Ihre meist verwendeten Impfstoffe. Jede Schiene fasst 13 Impfstofffläschchen, die maximale Lagerkapazität beläuft sich damit auf **195 Fläschchen**.

Mit **beschreibbaren Magnetstreifen** schaffen Sie Ordnung und Übersicht – ganz nach Ihrer Impfroutine.



Im **Sichtfenster** haben Sie jederzeit den gesamten Bestand im Blick und Nachbestellungen können rechtzeitig erfolgen.

Kontrollplan



Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Staubfilter reinigen																														
Kondenswasser entfernen																														
Monat	Januar					Februar					März					April					Mai					Juni				
Ventilatoren reinigen																														

Woche	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
Staubfilter reinigen																														
Kondenswasser entfernen																														
Monat	Juli					August					September					Oktober					November					Dezember				
Ventilatoren reinigen																														

Bitte beachten:

- Bei Defekt des Chillers wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter.
- MSD Tiergesundheit übernimmt keine Haftung für den Verlust von Impfstoffen durch einen Ausfall des Chillers
- Entsorgung: vorschriftsgemäße Entsorgung für elektronische Geräte

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Staubfilter reinigen																										
Kondenswasser entfernen																										
Monat	Januar			Februar				März					April				Mai			Juni						
Ventilatoren reinigen			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>																			<input type="checkbox"/>

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Staubfilter reinigen																											
Kondenswasser entfernen																											
Monat	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni						
Ventilatoren reinigen			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Woche	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Staubfilter reinigen																											
Kondenswasser entfernen																											
Monat	Juli				August				September				Oktober				November				Dezember						
Ventilatoren reinigen			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Bitte beachten:

- Bei Defekt des Chillers wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter.
- MSD Tiergesundheit übernimmt keine Haftung für den Verlust von Impfstoffen durch einen Ausfall des Chillers
- Entsorgung: vorschriftsgemäße Entsorgung für elektronische Geräte

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de
 Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

